

ניקוי וחיטוי- מנשם Ventway Sparrow

1. החלפת מסנן פנימי:

א. המסנן הפנימי יוחלף לאחר כ-300 שעות עבודה המנשם של (הנשמה בפועל). תתקבל התראה אוט' בהגעת המנשם לכדי כך.

ב. פעולות לביצוע:

1. בעזרת מברג שטוח, פתח את שלושת ברגי תא הסנן בפאנל האחורי.
2. שלוף את הסנן הישן
3. הכנס סנן חדש
4. בעזרת מברג שטוח, הברג וחזק את שלושת ברגי תא הסנן בפאנל האחורי.

2. ניקוי:

- א. שמור את המנשם והפריטים הנלווים נקיים בכל זמן, הקפד שכלל המכלולים יהיו נקיים משמן או גריז העלולים לכסות את גוף המכשיר.
- ב. נקה את המנשם והפריטים הנלווים בסיום כל הפעלה והקפד בתייעוד על כך.
- ג. הקפד כי לא יכנסו נוזלים לפתחי כניסת/יציאת האוויר ופתח הרמקול. אין להשקיע את המנשם במים ולהימנע מחשיפתו לגשם כבד. במידה ונרטבו, יש לייבש את המנשם והפריטים הנלווים בעזרת מטלית יבשה.
- ד. נקה את פתחי יציאת וכניסת האוויר בעזרת מטלית לחה ומעט סבון. לטובת חיטוי כלל השתמש בתמיסת דטרגנט 10%.
- ה. לאחר הניקוי, ייבש את המכשיר בעזרת מטלית יבשה.

3. חיטוי:

- א. במידה ובוצע שימוש במנשם בסביבה מזוהמת (חל"כ, זיהום ויראלי/בקטריאלי), יש לנקוט בפעולות הבאות:
- א. הקפד במילוי הנחיות החיטוי שניתנו על ידי גופי הבטיחות בארגוןך.
- ב. יש לחטא את המכשיר בסמוך לשימוש. הקפד בלבישת ביגוד מגן מתאים במהלך החיטוי.
- ג. חזור על הנחיות הניקוי המפורטות בסעיף 7.
- ד. מכיוון שפוטנציאל המזהמים האפשריים הינו נרחב, יהיה קשה לקבוע כיצד לבצע את החיטוי למכשיר. שיטות החיטוי ישתנו בהתאם לסוג המזהם ויתכן כי שיטה אחת לא תהיה יעילה עבור סוג מזהם אחר. לעיתים שיטות ונהלי החיטוי ישתנו בין מוסדות שונים. Inovytec מציעה למשתמשים בכל מוסד/בית חולים/ ארגון, להיוועץ בקצין הבטיחות המקומי ולהקפיד במילוי הוראות הניקיון והחיטוי לצידוד רפואי הנהוגות על פי חוק.